


Procedura facile da eseguire in soli 15 minuti

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

siemens-healthineers.com



Raccolta del Campione Nasale

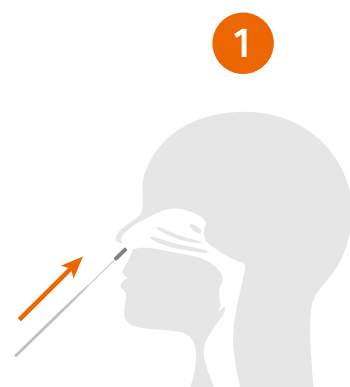


1
Usando il tampone sterile fornito, inserire con attenzione il tampone in una narice.



2
Il tampone deve essere inserito 2–4 cm fino a quando si incontra resistenza. Far ruotare il tampone 5 volte all'interno della narice.



3
Usando lo stesso tampone, ripetere il processo nell'altra narice, ruotando ancora 5 volte.

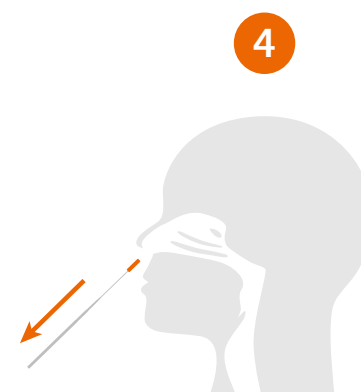


4
Prelevare il tampone dalla cavità nasale e seguire le istruzioni per il trattamento del campione.

Per la processazione del campione fare riferimento alla pagina successiva →

Non utilizzare il kit del test dopo la data di scadenza.
Se necessario, portare il campione e i componenti del test a temperatura ambiente (15–30 °C) e utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

Trattamento del Campione

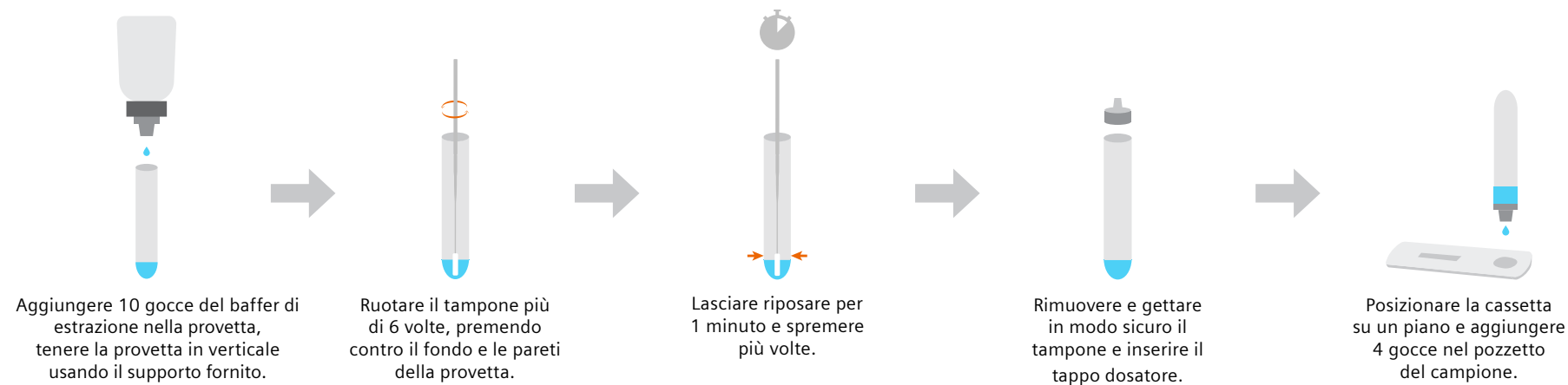

Interpretazione dei risultati

I risultati sono pronti in 15 minuti. Non interpretare i risultati dopo 20 minuti.



CLINITEST è un marchio di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi commerciali e le marche sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto può variare a seconda del paese.
Distribuito da Siemens Healthineers.

Sede Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germania
Telefono: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Pubblicazione a cura di

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Telefono: +1 781-269-3000

Contatti locali

Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano, Italia
Telefono: +39 02 243 1
siemens-healthineers.com/it