



Abspielen von Audio-Dateien für Ihre Patient*innen

Sie können unsere In-Bore-Audio-Dateien ganz einfach für Ihre Patient*innen während des Scans abspielen



Um die bereitgestellten Audiodateien während eines Scans abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:



Laden Sie die Dateien auf ein Abspielgerät herunter, beispielsweise ein Smartphone oder Tablet.



Verbinden Sie das Gerät mit dem Aux-Eingang des Intercoms im Kontrollraum.

Dazu brauchen Sie

- Entweder ein 3,5 mm Klinkenkabel
- Oder, falls Ihr Gerät keinen Kopfhörerausgang hat, einen passenden Adapter (bspw. USB C auf 3,5 mm Klinke)



Um die bestmögliche Tonqualität zu erreichen, stellen Sie bitte ein:

- Auf Ihrem Abspielgerät: Lautstärke Kopfhörer 100 %, Lautstärke Media Player max. 1–2 %
- In den Einstellungen Ihres Scanners: Lautstärke Intercom 2–3 Klicks von Null aufwärts (patientenabhängig)
- Direkt am „Select&Go“ Display: Regeln Sie die Lautstärke, die Patient*innen hören



Öffnen Sie die gewünschte Datei auf Ihrem Gerät und drücken Sie „Play“.