


Sistema CLINITEK Status Connect

Transmita una gran cantidad de información clínica con una solución de análisis de orina conectada

Elimine la subjetividad con pruebas automatizadas en el punto de atención

siemens-healthineers.com/poc

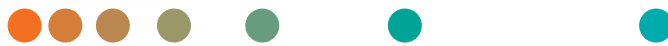

SIEMENS
Healthineers

El sistema CLINITEK Status Connect: Pruebas de análisis de orina confiables en el punto de atención

El análisis de orina proporciona una gran cantidad de información clínica indispensable. Las soluciones de análisis de orina impulsadas por el rendimiento de Siemens Healthineers respaldan la detección temprana, el monitoreo y el manejo de enfermedades y afecciones, como diabetes, enfermedad renal, infecciones del tracto urinario (ITU) y embarazo, lo que le permite obtener resultados con confianza.

El sistema CLINITEK Status® Connect con tecnología Auto-Checks® simplifica y agiliza sus operaciones diarias. Esta solución automatizada de análisis de orina y pruebas de embarazo con hCG en el punto de atención elimina la subjetividad de una lectura visual, ayuda a mejorar la precisión, ahorra tiempo y permite aumentar la productividad.

El analizador automatizado ayuda a mejorar los resultados clínicos

- Elimina la subjetividad de las pruebas leídas visualmente y ofrece resultados procesables
- Los resultados impresos/transmitidos automáticamente ahorran tiempo y minimizan los errores de transcripción
- El cálculo automático de la relación albúmina/creatinina y proteína/creatinina para la detección temprana de la enfermedad renal reduce la necesidad de recolección de orina las 24 horas

La interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar es ideal para entornos de punto de atención

- Introducción cómoda de la información del paciente/operador
- Visualización en pantalla de los resultados completos del paciente, disponible cuando los necesite
- Agiliza el flujo de trabajo y elimina la necesidad de documentación manual
- La operación simple y eficiente ofrece resultados de tiras de orina en solo 1 minuto y resultados de hCG en 2-5 minutos

La plataforma CLINITEK Status Connect de última generación proporciona una gestión de datos y conectividad flexibles

- Transmite los resultados a la historia clínica electrónica (EMR), LIS o al administrador de datos POC de terceros
- Wi-Fi integrado con compatibilidad de red ampliada†
- La conectividad bidireccional permite la configuración remota
- Gestión avanzada del control de calidad para el seguimiento de los resultados del control de calidad
- Se conecta al POCcelerator™ Data Management System de Siemens Healthineers



Simplifica el proceso de pruebas y mejora la gestión de riesgos

- El código de barras del ID del paciente/operador y la información del reactivo reducen los errores de transcripción
- El ID del paciente/operador garantiza la trazabilidad
- La gestión avanzada del operador y del control de calidad le permite impulsar el cumplimiento
 - El bloqueo del operador evita el uso no autorizado y protege la información
 - El bloqueo de control de calidad impide informar los resultados del paciente si no se sigue el proceso

†La función no está disponible en todos los países. Póngase en contacto con su representante local para conocer la disponibilidad.



El menú más amplio para pruebas de análisis de orina en el punto de atención en un solo analizador

Familia de Tiras Reactivas Multistix®	Las tiras de análisis de orina más utilizadas para las pruebas de rutina
Tiras Reactivas CLINITEK® Microalbumin 2	Prueba de relación albúmina/creatinina para detectar enfermedad renal temprana en pacientes con diabetes confirmada
Prueba de embarazo CLINITEST® hCG	Test cualitativo de hCG para identificar o excluir rápidamente el embarazo



Control de Calidad Interno

Las Tiras de Control Positivo y Negativo de Chek-Stix® se pueden utilizar para verificar la integridad de los resultados, lo que proporciona una base conveniente para un programa de control de calidad de análisis de orina.



Soluciones de análisis de orina automatizadas que se adaptan a sus necesidades

Característica/Función	Sistema CLINITEK Status Connect	Analizador CLINITEK Status+
Tecnología Auto-Checks <ul style="list-style-type: none"> • Detección de exposición a la humedad • Comprobación de interferencias comunes en la muestra† • Identificación del tipo de tira 	● ● ●	● ● ●
Gestión del Control de Calidad <ul style="list-style-type: none"> • Programación del control de calidad • Bloqueo del control de calidad • Transmisión de los resultados del control de calidad 	● ● ●	— — —
Gestión de Operadores <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueo del operador • Descarga de la lista de operadores 	● ●	● —
IDs de paciente/operador con código de barras, información del lote	●	—
Gestión remota de la configuración	●	—
Tipo de conexión	Ethernet—bidireccional	Serial—unidireccional

†La función no está disponible en todos los países.



En Siemens Healthineers, buscamos constantemente formas de ayudar a nuestros clientes a reducir su carga ambiental. El sistema CLINITEK Status Connect está construido principalmente con plásticos y metales que se pueden reciclar casi por completo para obtener materiales o energía. Esta solución conectada permite a nuestros clientes prescindir del papel.

Siéntase seguro de sus resultados

La tecnología patentada Auto-Checks de Siemens Healthineers ayuda a garantizar la calidad y precisión de los datos, al tiempo que facilita una mejor interpretación de los resultados. Nuestras soluciones de pruebas proporcionan importantes controles de calidad automatizados con cada prueba.



Tres Funcionalidades de Auto-checks

1 Identificación del tipo de tira
Nuestra familia de analizadores de orina CLINITEK tiene un software que reconoce las bandas de ID e identifica automáticamente el tipo de tira; no se necesita ningún paso manual para ajustar a un tipo diferente.

Otros analizadores no pueden detectar automáticamente los tipos de tiras que requieren pasos manuales adicionales para el flujo de trabajo, lo que puede dar lugar a resultados incorrectos si se ejecutan tiras de otras marcas en el analizador.

2 Detección de exposición a la humedad
Utiliza una almohadilla leucocitaria para detectar la sobreexposición a la humedad de la tira.*
No informa de los resultados si está demasiado expuesto, lo que minimiza los falsos positivos.

- Algoritmos diseñados para detectar la decoloración en la almohadilla leucocitaria debido a la exposición a la humedad
- Una vez detectado, se informará del código de error E69 solicitando a los usuarios que utilicen una nueva tira

3 Comprobación de interferencias comunes en la muestra†
Detecta interferencias comunes en la muestra e informa al profesional de la salud de un resultado potencialmente comprometido.



*Disponible solo cuando se usan tiras de Siemens Healthineers con bandas de identificación o de color.

†La función no está disponible en todos los países. Póngase en contacto con su representante local para conocer la disponibilidad.

En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que los proveedores de atención médica aumenten el valor al empoderarlos en su viaje hacia la expansión de la medicina de precisión, la transformación de la prestación de atención y la mejora de la experiencia del paciente, todo lo cual es posible gracias a la digitalización de la atención médica.

Se estima que 5 millones de pacientes en todo el mundo se benefician cada día de nuestras tecnologías y servicios innovadores en las áreas de diagnóstico e imágenes terapéuticas, diagnóstico de laboratorio y medicina molecular, así como de servicios empresariales y de salud digital.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más de 120 años de experiencia y 18.000 patentes en todo el mundo. A través de la dedicación de más de 50.000 colegas en 75 países, continuaremos para innovar y dar forma al futuro de la atención médica.

Auto-Checks, Chek-Stix, CLINITEK, CLINITEK Status, CLINITEST, Multistix, POCcelerator, Point of Care Ecosystem y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está sujeta a diferentes requisitos reglamentarios. Póngase en contacto con su representante local para conocer la disponibilidad.

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Publicado por

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Phone: +1 781-269-3000

Información de Contacto Local

Siemens Healthcare Diagnostics
Point of Care Diagnostics
Ejército Nacional 350 piso 3,
Col. Polanco V Sección
CP 11560. Ciudad de México, México
Teléfono: +52 55 5328 2000